

ГИСТОТИПИРУЮЩАЯ ПАНЕЛЬ Набор HLA-B 27 -015

Набор сывороток антилейкоцитарных HLA-A, B, C, DR
гистотипирующих жидких
по ТУ 9398-449-13195330-2007
РУ ФСР 2008/02431 от 01 апреля 2021 года

Идентификационный номер _____ Дата исследования «__» ____ 20__ Использовать до: 19.04.2023
 Фамилия, и. о. _____ Подпись врача: _____ Серия компонента: _____
 Дата рождения _____ Подпись врача: _____ Использовать до: _____
 Диагноз _____ Жизнеспособность клеток _____ %

Антиген В27 ОБНАРУЖЕН / НЕ ОБНАРУЖЕН Подпись зав. лабораторией _____

Лунка	Индекс сыворотки	Специфичность сыворотки	Результат	Лунка	Индекс сыворотки	Специфичность сыворотки	Результат
1A	12308	Контроль (+)		7A			
1B	12479	Контроль (-)		7B			
1C	362	B27 [B13]		7C			
1D	667	B27		7D			
1E	061	B27		7E			
1F	0279	B27		7F			
2F	328	B22		8F			
2E	0487	B13		8E			
2D	0758	B13 [B7]		8D			
2C	0013	B40 (60,61) ,B13		8C			
2B	0977	B7		8B			
2A	0287	B7		8A			
3A	0427	B7, 40 (60,61)		9A			
3B	059	B40 (60,61)		9B			
3C	358	B40 (60,61),41,13,47		9C			
3D	712	B40 (60,61)		9D			
3E				9E			
3F				9F			
4F				10F			
4E				10E			
4D				10D			
4C				10C			
4B				10B			
4A				10A			
5A				11A			
5B				11B			
5C				11C			
5D				11D			
5E				11E			
5F				11F			
6F				12F			
6E				12E			
6D				12D			
6C				12C			
6B				12B			
6A				12A			

Микролимфоцитотоксический тест

- Перед использованием разморозить микропланшеты, содержащие в каждой лунке по 1 мкл анти-HLA сыворотки, в течение 10-15 мин
- В каждую лунку HLA-A, B планшеты добавить 1 мкл суспензии лимфоцитов (2000-3000 кл/мкл)
- Инкубировать при комнатной температуре (20⁰ C) в течение 30 мин
- Добавить 5 мкл кроличьего компонента
- Инкубировать при комнатной температуре (20⁰ C) в течение 60 мин
- Добавить 3 мкл 5% раствора эозина, через 5 мин 5 мкл альдофиса для фиксации
- Учет реакции производить не ранее, чем через 30 мин

Оценка результатов реакции

Оценка в баллах

% погибших клеток

0% - 10%
11% - 20%
21% - 50%
51% - 80%
81% - 100%

1 Отрицательная
2 Сомнительно-отрицательная
4 Слабо-положительная
6 Положительная
8 Сильно-положительная

АО "Межрегиональный центр иммуногенетики и гистотипирующих реагентов "Тисанс"

196608, Россия, Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Жуковско-Волынская, дом 10, лит. А, помещ. 5-Н, комн. 22

Тел.: +7 (911) 952-59-80, E-mail: gisans@mail.ru, www.gisans.info

Примечания: () сплиты [] реагирует не всегда